

Oxivir Excel™ spumă

Detergent dezinfectant lichid cu spectru larg de acțiune, destinat și pentru dispozitive medicale

Descriere

Diversey Care Oxivir Excel Foam este un agent de curățare și dezinfectant într-un singur pas, cu spectru larg, gata de utilizare și timpi scurți de contact. Bazat pe tehnologia brevetată a Diversey Care cu formula accelerată pe bază de peroxid de hidrogen, Oxivir Excel Foam poate fi utilizat pe suprafețe dure, neporoase, și pe anumite articole de mobilier delicate.

Proprietăți cheie

- Bactericid, virucid, levuricid, fungicid*,
- Dezinfectează în mai puțin de 1 minut
- Profil pozitiv de siguranță pentru utilizator și suprafețe
- Curățare eficientă
- Nu conține parfum
- Se descompune în apă și oxigen
- Nu este necesară clătirea

Avantaje

- Eficacitatea cu spectru larg asigură cele mai ridicate nivele de protecție a pacientului. Testat extensiv conform standardelor europene și eficace împotriva mai multor agenți patogeni, este declarat a fi complet virucid inclusiv *Poliovirus*, *Adenovirus* și *Murine norovirus*, considerat eficace împotriva tuturor virusurilor cu anvelopă precum: HIV, HBV, HCV, *Virusul gripal*, *Vaccinia virus* și *Coronavirus*
- Timpii scurți de contact păstrează suprafața umedă asigurând astfel eficacitatea dezinfectării
- Performanță de curățare excelentă, inclusiv detartrare și prevenirea formării depunerilor de calcar ceea ce face inutilă etapa de pre-curățare
- Profilul excelent de siguranță pentru utilizator reduce riscul lucrătorilor, fără avertizări de pericol; nu conține substanțe iritante pentru căile respiratorii
- Formula AHP este delicată cu suprafețele, prelungind durata de viață a echipamentelor
- Potrivit pentru utilizare în zone de risc din domeniul medical, inclusiv săli de operații, unități de terapie intensivă neonatală și saloanele pacienților

Instrucțiuni de utilizare


Aplicare

Curățare și dezinfectare cu spumă:

1. Îndepărtați murdăria grosieră.
2. Aplicați pe suprafețe fie prin pulverizarea pe lavetă și ștergerea suprafețelor, fie prin aplicarea direct pe suprafață utilizând un pulverizator cu pistol.
3. După timpul de contact**, ștergeți până la uscare sau lăsați să se usuce.

Sistem cu șervețele uscate de unică folosință

1. Pregătiți sistemul cu șervețele uscate de unică folosință, conform instrucțiunilor.
2. Îndepărtați murdăria grosieră.

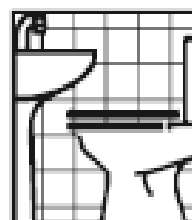

terapie intensivă, unități de

3. Scoateți un șervețel și ștergeți suprafața.
4. După timpul de contact**, ștergeți până la uscare sau lăsați să se usuce.
5. Schimbați șervețelul atunci când este vizibil murdar sau când treceți la o altă zonă de curățat.

Important: A nu se amesteca cu alte produse. A nu se utiliza pe suprafețe sensibile la apă sau acid.

*Atunci când este utilizat ca dezinfectant final cu etapă preliminară de curățare

**Asigurați-vă că suprafețele rămân ude pe durata timpului de contact

Date tehnice

Aspect:	lichid limpede, incolor
Densitate relativă [20 °C]:	1,000
pH - la utilizare:	1,95
Punct de aprindere:	N/A
Termen de valabilitate:	720 zile
Parfum:	neutru

Datele de mai sus sunt tipice pentru producția normală și nu trebuie interpretate ca specificații de calitate.

Informații despre manipulare și depozitare în condiții de siguranță

Informații complete referitoare la manevrarea și eliminarea produsului se regăsesc în Fișa cu Date de Securitate, disponibilă separat. A se păstra în recipientul original. A se evita temperaturile extreme. Reacționează în contact cu substanțele oxidabile.

Compatibilitatea produsului

În condițiile recomandate de utilizare, Oxivir Excel Foam de la Diversey este adecvat pentru majoritatea materialelor uzuale.

Informații ecologice

Surfactanții utilizați în compoziția acestui produs îndeplinesc cerințele de biodegradabilitate finală în conformitate cu Regulamentul UE privind detergenții, CE 648/2004.

Date microbiologice

Eficacitate dovedită prin conformitatea cu: EN13727, EN13624, EN14476, EN13704

Dimensiuni disponibile ambalaj

Codul articolului | Dimensiune ambalaj | Tip ambalaj